

Gebrauchsinformation

Wirkungsmechanismus: Das mittels Klistier eingeführte Wasser bewirkt einerseits eine Erweichung und Verdünnung des Stuhls und andererseits einen Dehnungsreiz im Enddarm. Ist die eingeführte Wassermenge genügend gross, kommt es zu reflektorischen Darmbewegungen und schliesslich zur Darmentleerung.

Anwendungsmöglichkeiten: Zur raschen Entleerung des Enddarms bei Verstopfung, zur Anregung der Darmtätigkeit bei Darmträgheit, zur kontrollierten Darmentleerung bei Stuhlinkontinenz. In der Naturheilkunde: zur Darmreinigung, z. B. beim Fasten.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten (für Fachpersonen): Zur raschen Entleerung des Enddarms vor Operationen, zur Geburtsvorbereitung, vor Rektosigmoidoskopie, vor Unterleibsuntersuchungen, zur kontrollierten Darmentleerung bei Kolostoma.

In folgenden Fällen dürfen keine Darmeinläufe durchgeführt werden: Bei akuten Bauch- und Unterleibskrankungen (bei Bauchschmerzen und Erbrechen mit unklarer Ursache), Verletzungen im Bereich des Anus.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Nur sauberes Wasser verwenden. Gleitmittel auf Darmrohrspitze auftragen, um mechanische Irritation des Analkanals zu vermeiden. Bei Widerstand oder Schmerzen bei der Einföhrung des Darmrohrs Vorgang abbrechen und Arzt konsultieren.

Schwangerschaft: Schwangere Frauen können bis zur 20. Schwangerschaftswoche Einläufe zur Stuhlentleerung einsetzen. Ab der 21. Schwangerschaftswoche sollten Einläufe nicht ohne Rücksprache mit Hebamme, Frauenärztin oder Frauenarzt durchgeführt werden, da unter Umständen Wehen ausgelöst werden können.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen: Wir empfehlen Einläufe nur mit Zustimmung des Kindes/Jugendlichen durchzuführen und die Wassermenge dem Alter entsprechend anzupassen.

Hinweise zur Durchführung: Spülen Sie die Flasche vor der ersten Anwendung mit sauberem Wasser. Waschen Sie sich vor und nach der Irrigation gründlich Ihre Hände.

Vorbereitung: Flasche mit körperwarmem sauberem Leitungswasser auffüllen, Schraubverschluss anschrauben. Rückschlagventil mit Darmrohr verbinden und Verlängerungsschlauch mit Flasche zusammenstecken (Schlauchklemme optional). Bei Bedarf Handschuhe, Gleitmittel, wasserfeste Schutzunterlage und Abfallbehälter in der Nähe bereitstellen.

Hinweis Darmrohr: Das Darmrohr hat zwei seitlich gerundete Öffnungen für den Wasseraustritt. In seltenen Fällen werden die Öffnung als zu wenig abgerundet empfunden. Begutachten Sie das Darmrohr vor der Anwendung.

Für den Patienten bei Selbst-Anwendung: Setzen Sie sich bequem auf die Toilette oder legen Sie sich entspannt auf den Rücken und führen Sie dann das Darmrohr sanft einige Zentimeter ein. Stellen Sie die Flasche auf den Kopf und pumpen Sie das Wasser durch manuelles Zusammendrücken der Flasche in den Enddarm. Ziehen Sie danach das Darmrohr heraus, und entleeren Sie den Darm. Wiederholen Sie den Vorgang wenn nötig.

Starter-Set "Basic"

REF PR101

Bestandteile: 1 Flasche 750ml mit Lufterlassventil
1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
3 Darmrohre

Starter-Set "Plus"

REF PR102

Bestandteile: 1 Flasche 750ml mit Lufterlassventil
1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
"Plus": 6 Darmrohre
1 Aufbewahrungstasche

Ersatz-Zubehör

REF PR103

Bestandteile: 1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
20 Darmrohre

Starter-Set "Basic" Komfort

REF PR104

Bestandteile: 1 Flasche 750ml mit Lufterlassventil
1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
1 Verbindungsschlauch mit zwei Trichtern
1 Irrigator mit Olive

Starter-Set "Plus" Komfort

REF PR105

Bestandteile: 1 Flasche 750ml mit Lufterlassventil
1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
1 Verbindungsschlauch mit zwei Trichtern
1 Irrigator mit Olive
"Plus": 1 Aufbewahrungstasche

Ersatz-Zubehör Komfort

REF PR106

Bestandteile: 1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
3 Verbindungsschläuche mit zwei Trichtern
3 Irrigatoren mit Olive

Für Pflegepersonen zur Anwendung am Patienten: Der Patient legt sich am besten mit angezogenen Knien auf die linke Seite. Darmrohr vorsichtig einführen. Flasche auf den Kopf stellen und das Wasser in den Enddarm fliessen lassen. Die Flüssigkeitseinföhr lässt sich durch den Gebrauch der Klemme unterbrechen. Bei Bedarf dem Patienten bei der Ausscheidung behilflich sein.

Empfehlungen zur Reinigung und Wiederverwendung: Wir empfehlen aus hygienischen Gründen den **ausschliesslich persönlichen Gebrauch** des Geräts. Die Gerätebestandteile Flasche mit Schraubverschluss und Rückschlagventil mit Verlängerungsschlauch sollen nach Gebrauch mit Seife gereinigt werden.

Das Darmrohr und der Irrigator mit Olive sind für den Einmalgebrauch vorgesehen.

Lagerungshinweise: Bestandteile trocken und staubgeschützt lagern.

Weitere Informationen: www.reprop.de, www.reprop.at, www.reprop.ch, www.reprop-clyster.com


 Practomed UG, Industriestrasse 2, 79541 Lörrach, Deutschland, www.practomed.de

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwer wiegenden Vorfälle müssen dem Hersteller (Practomed) und der zuständigen Behörde des Mitgliedlandes, in dem Sie als Anwender bzw. Patient niedergelassen sind, gemeldet werden.




clip / pince / Schlauchklemme / klem /
abrazadera de la manguera

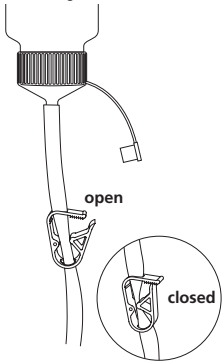


REF PR101

REF PR102

REF PR103

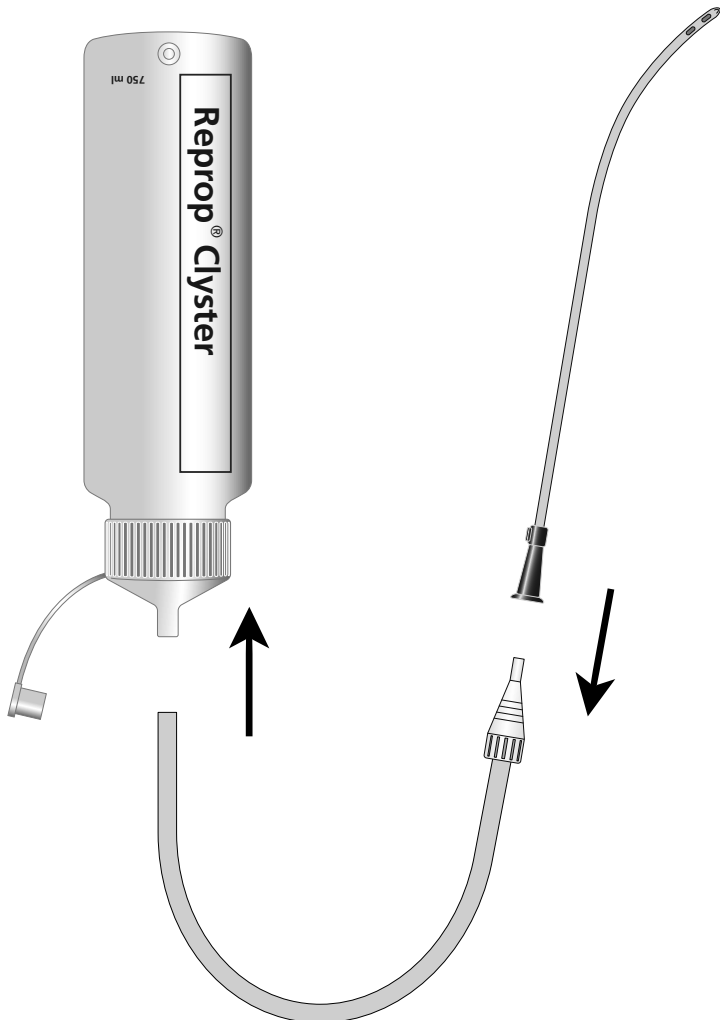

clip / pince / Schlauchklemme / klem /
abrazadera de la manguera

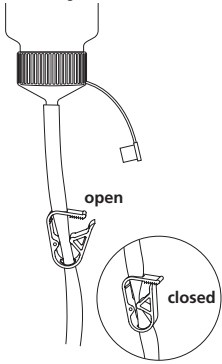

open

closed

REF PR104

REF PR105

REF PR106

